

1. 제품명 : 보행차(복지용구 등록제품)

2. 모델명 : 슈마DA-2500

3. 종 류 : B형 옥내용

4. 사양

- 가. 최대사용자체중 : 100kg
- 나. 제품무게 : 24kg
- 다. 제품크기 : 730(W) x 850(D) x 2150(H)
- 라. 손잡이높이 : 90~138cm 조절가능(스텐레스)
- 마. 철봉높이 : 195~215cm 조절가능(스텐레스)
- 바. 바퀴크기 : 10.5cm

5. 사용 대상자

- 가. 불안전 척수손상환자
- 나. 뇌졸중 환자, 파킨슨 환자, 치매 환자
- 다. 오랜 침상생활로 보행이나 일어서는 능력이 없는 환자
- 라. walker 또는 cane, crutch를 사용하여 보행훈련이 필요한 환자
- 마. 정부지원 대상(기초생활 수급자 무료)




6. 특징점

- 가. 넘어 지는 불안을 해소 한다.
- 나. 편마비 환자도 탄력밴드의 텐션으로 알맞은 무게가 가해져 자연스러운 보행이 가능하다.
- 다. 걸음걸이와 균형 잡기가 불안정한 분에게 안정적인 보행훈련을 할 수 있다.
- 라. 상체를 견인하므로 하중을 줄인 상태로 사용할 수 있다.
- 마. 무릎이 약하신 분들의 체중 부하를 줄여주어 효과적으로 사용할 수 있다.
- 바. 사용자의 키에 따라 손잡이 높이를 간단하게 조절할 수 있다.

7. 제품구성

- 가. 가로대(본체)
- 나. 기둥2개
- 다. 철봉(높낮이 조절)
- 라. 손잡이(높이조절 가능)
- 마. 탄력밴드셋
- 바. 사용설명서

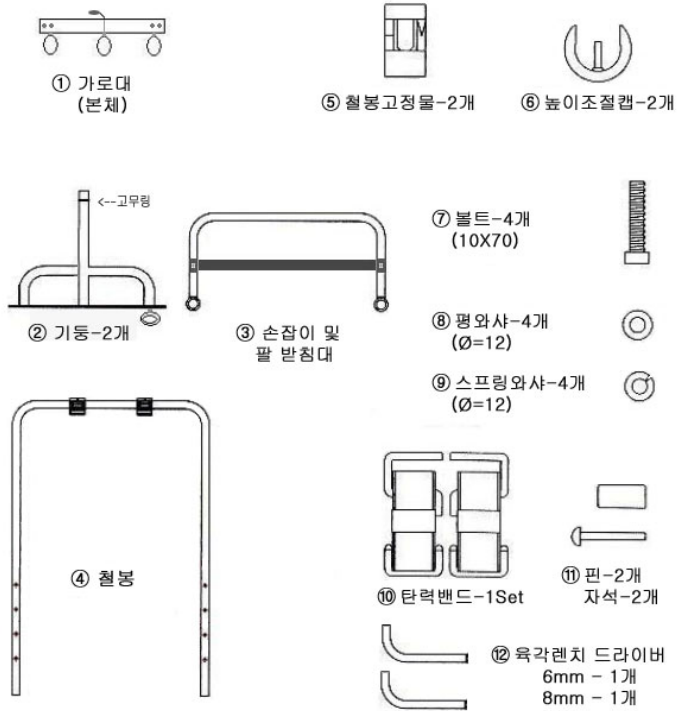

8. 제품 명칭

- ① 탄력밴드
- ② 보조자켓
- ③ 철봉 고정물 및 철봉조절 캡
- ④ 손잡이 및 팔 받침대
- ⑤ 손잡이 높이조절 링
- ⑥ 기둥
- ⑦ 방향전환 레버(직진)
- ⑧ 바퀴(회전)



9. 취급(운동) 시 주의사항

- 환자의 상태에 따라 견인 높이를 조절해 주십시오.
- 개조하거나 수리하지 마시고 판매점이나 당사로 연락하십시오.
- 다음과 같은 사람은 의사와 상담 후에 사용하십시오.
 - ▶ 의사의 치료를 받고 있는 사람이나 특히 신체의 이상을 느낄 때.
 - ▶ 악성종양이 있는 사람
 - ▶ 심장에 장애를 갖고 있는 사람
 - ▶ 생리중이거나 임신중인 사람
 - ▶ 안정이 필요한 사람
 - ▶ 열이 높은 사람(38도 이상)
 - ▶ 골다공증이 있는 사람
- 골절 등을 수술하여 일정기간이 경과하지 않은 환자는 사용을 금한다.
- 다른 치료품과 동시에 사용을 금한다.
- 중증환자는 보호자 또는 요양사를 동반하여 보행훈련 하시길 권합니다.